


SmartGlow 額溫量測計 使用說明

(先移除保護蓋)

1. 將量測感應器對準額頭距離約 3 公分處。
2. 按住量測鍵不放，螢幕會顯示閃爍的 "scan"
3. 由額頭滑至髮際線

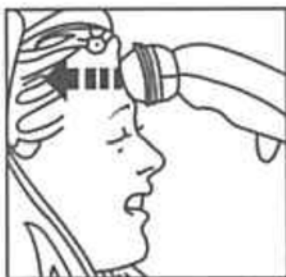

量測中會聽到連續嗶聲。(量測指示燈會閃爍)

3-1 鬆開量測鍵，將額溫槍移開額頭。


4. 讀取溫度。

5. 30 秒後自動關機，如欲接續量測下一位，請於量測完畢後直接按一下量測鍵，即可進入快速關機。

6. 重複步驟 1~4，進行量測。



狀況說明

<p>1. °C 與 °F 單位切換說明 連續短按量測鍵 9 次，螢幕出現 °F - °C °F 後，再長按量測鍵，直到螢幕 °F - °C °C</p>	<p>2. 當量測值過低會顯示 LO 太高會顯示 HI</p> 
<p>3. 當出現錯誤會出現 "Err" 此時，請拿掉電池後，約 30 分鐘後再使用。</p>	<p>4. 當出現 "HI. R" 表示環境溫度過高，請放置陰涼處 30 分鐘後再使用。 當出現 "LO. R" 表示環境溫度過低，請放置溫暖處 30 分鐘後再使用。</p>
<p>5. 當螢幕右下角顯示電池符號，代表需更換電池</p>	